


# MULTIPAD

## EFFIZIENT, EINFACH UND FLEXIBEL



Die flexible MULTIPAD Produktfamilie, bestehend aus MULTIPAD Standard, MULTIPAD Plus und MULTIPAD Slim, kann einzeln oder in Kombination bei allen Untersuchungen mit Kopf- und Extremitätenspulen eingesetzt werden.

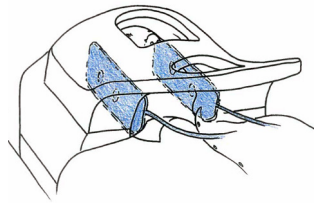


**MULTIPAD Standard, Plus oder Slim** je nach Grösse des Zwischenraums auf/ neben dem Kopfhörer oder direkt auf dem Ohr des Patienten platzieren. Kleinste Nick- oder Rotationsbewegungen des Kopfes können dadurch minimiert werden.




**MULTIPAD Slim**, je nach Platzverhältnissen ein oder beide Kissen einsetzen. Dadurch können die Atembewegungen des Patienten reduziert werden.

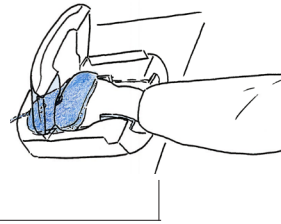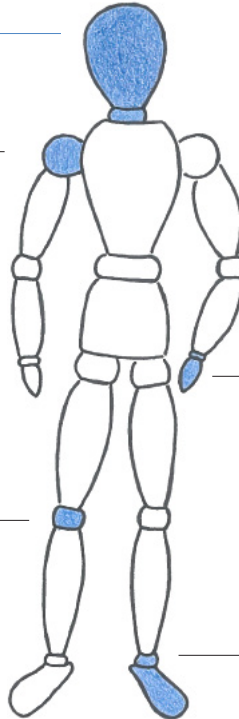

**MULTIPAD Slim**, von vorne in die Spule schieben und auf die Finger legen. Dies hilft ungewollte Bewegungen, insbesondere aufgrund der "Superman" Haltung, zu unterdrücken.

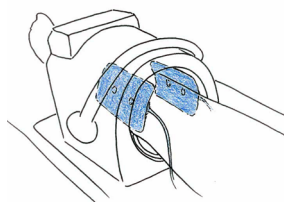

**MULTIPAD Standard, Plus oder Slim** je nach Grösse des Zwischenraums auswählen. MULTIPAD kann im Ober- und Unterschenkelbereich lateral zur Patella positioniert oder zur Unterstützung der Unterschenkelstabilität eingesetzt werden.

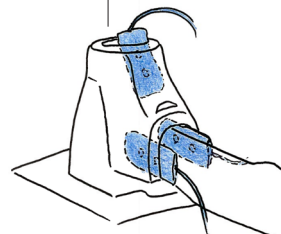

**MULTIPAD Plus**, je nach Platzverhältnissen ein oder beide Kissen auf die Zehen legen. Somit können bei Vorfuß- und OSG-Untersuchungen auch kleinere Zehenbewegungen verringert werden.

Führen Sie Ihre Untersuchungen mehrheitlich mit Flex-Spulen durch oder verwenden Sie Knie- und Kopfspulen auch für andere Körperregionen? Die flexible Anwendbarkeit der MULTIPAD Produktfamilie hilft Ihnen auch bei diesen Untersuchungsformen den Patienten stabil und komfortabel zu lagern.

Weitere Tipps & Tricks zur Verwendung der MULTIPAD Produktfamilie finden Sie auf unserer Website.