


MULTIPAD

EFFIZIENT, EINFACH UND FLEXIBEL


Die flexible MULTIPAD Produktfamilie, bestehend aus MULTIPAD Standard, MULTIPAD Plus und MULTIPAD Slim, kann einzeln oder in Kombination bei allen Untersuchungen mit Kopf- und Extremitätenspulen eingesetzt werden.

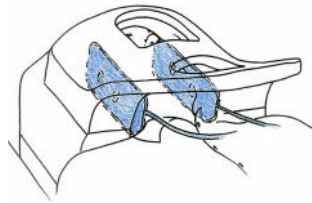



MULTIPAD Standard, Plus oder Slim je nach Grösse des Zwischenraums auf/ neben dem Kopfhörer oder direkt auf dem Ohr des Patienten platzieren. Kleinste Nick- oder Rotationsbewegungen des Kopfes können dadurch minimiert werden.




MULTIPAD Slim, je nach Platzverhältnissen ein oder beide Kissen einsetzen. Dadurch können die Atembewegungen des Patienten reduziert werden.

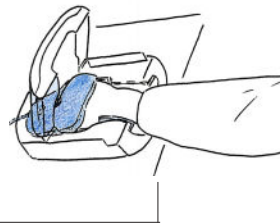

MULTIPAD Slim, von vorne in die Spule schieben und auf die Finger legen. Dies hilft ungewollte Bewegungen, insbesondere aufgrund der "Superman" Haltung, zu unterdrücken.

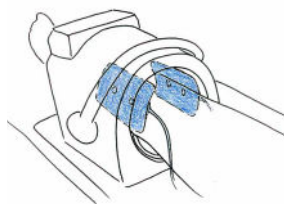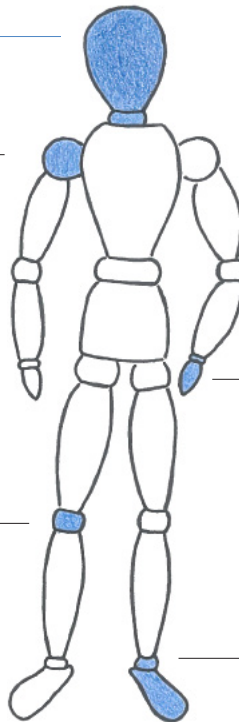

MULTIPAD Standard, Plus oder Slim je nach Grösse des Zwischenraums auswählen. MULTIPAD kann im Ober- und Unterschenkelbereich lateral zur Patella positioniert oder zur Unterstützung der Unterschenkelstabilität eingesetzt werden.

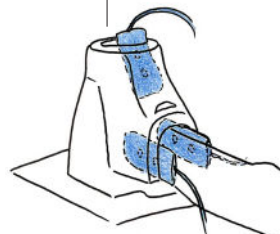

MULTIPAD Plus, je nach Platzverhältnissen ein oder beide Kissen auf die Zehen legen. Somit können bei Vorfuß- und OSG-Untersuchungen auch kleinere Zehenbewegungen verringert werden.

Führen Sie Ihre Untersuchungen mehrheitlich mit Flex-Spulen durch oder verwenden Sie Knie- und Kopfspulen auch für andere Körperregionen? Die flexible Anwendbarkeit der MULTIPAD Produktfamilie hilft Ihnen auch bei diesen Untersuchungsformen den Patienten stabil und komfortabel zu lagern.

Weitere Tipps & Tricks zur Verwendung der MULTIPAD Produktfamilie finden Sie auf unserer Website.