


DIAPATH

Constant Innovation in Anatomic Pathology

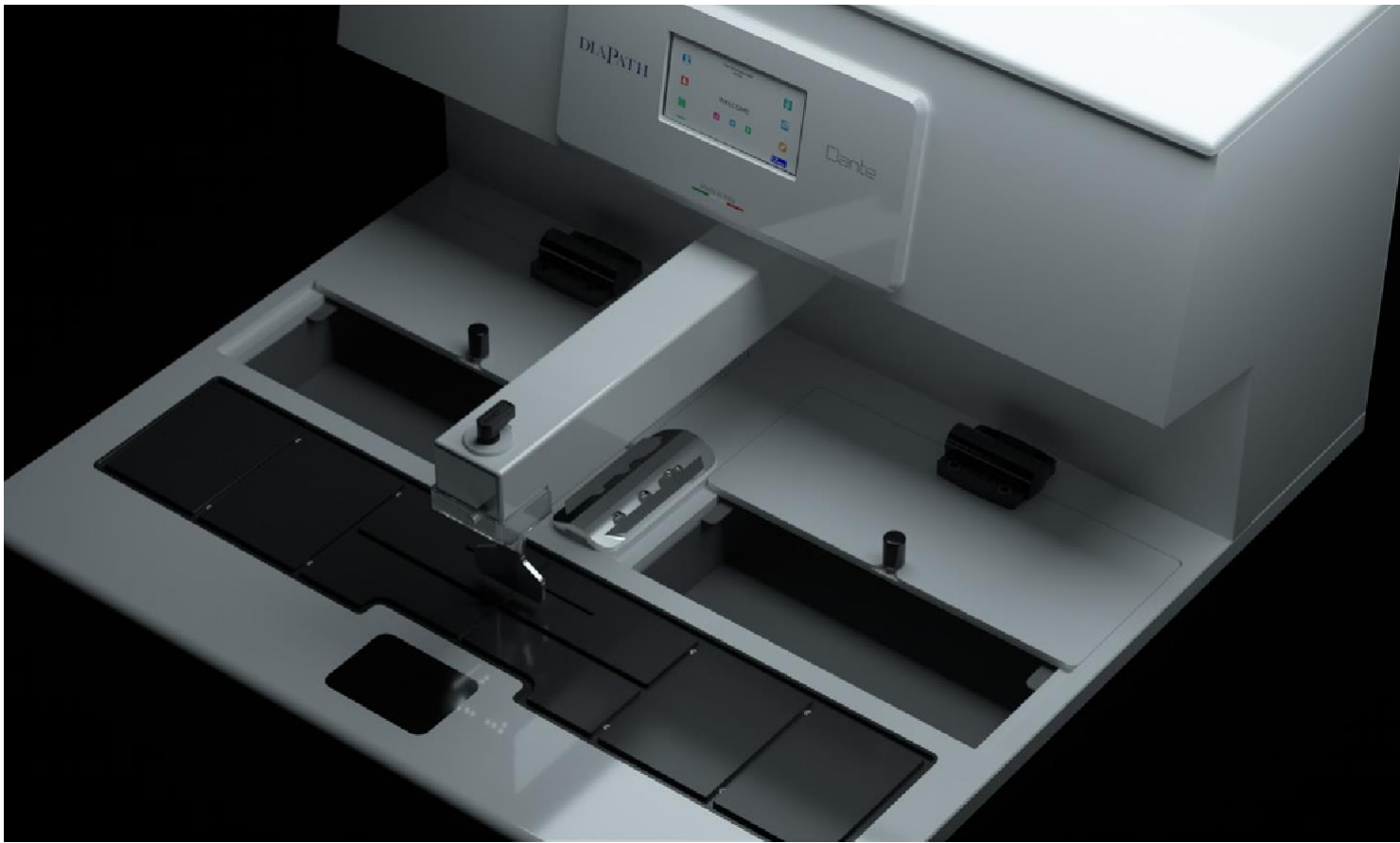

Dante

Das modular aufgebaute Paraffin-Ausgießsystem

Ausgießmodul + Kühlplatte

SDSDC9000

SDSDF9000



IVD CE

MADE IN ITALY

Dante, 100% Made in Italy.

Dante war ein **bedeutender Dichter des Mittelalters und gilt als Vater der italienischen Sprache**. Für DiaPath ist Dante das, woran wir glauben. **“Made in Italy” und italienisches Design** stehen für uns für die **Liebe zum Detail und zu den schönen Dingen**. Das ist unser Weg zur Perfektion.




Die modulare Lösung, die Ihren Arbeitsablauf erleichtern wird.

Im Laboralltag kommt es darauf an, Arbeitsabläufe schnell und vor allem komfortabel zu gestalten. Aus diesem Grund hat DiaPath das System **Dante** entwickelt, welches aus einem **Ausgießmodul und einer Kühlplatte** besteht. Dank seines **ergonomischen und funktionalen Designs** ermöglicht es **Dante**, die **Körperhaltung zu verbessern** und den **Bewegungsapparat des medizinischen Personals langfristig zu schützen**. Um den Platzbedarf im Labor bestmöglich ausnützen zu können, besteht das **Dante Ausgießsystem** aus **unabhängigen, flexiblen und untereinander kombinierbaren Modulen**.



Die Sonderfunktionen von Dante, für Sie entwickelt:

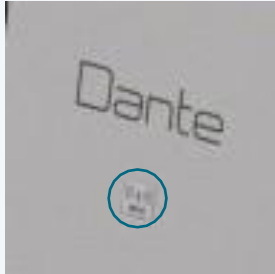


RFID TECHNOLOGIE

Ermöglicht die Rückverfolgung von Proben.



PARAFFINBEHÄLTER MIT 6 LITER INHALT

Verlängert den Zeitraum bis zur nächsten Nachfüllung. Ein integriertes Filtersystem hält mögliche Verunreinigungen im Granulat zurück.

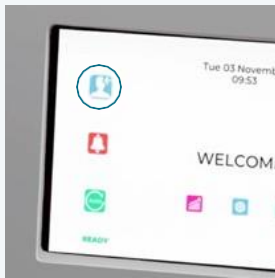

ANPASSUNG DES BENUTZERPROFILS

Jeder Benutzer kann persönliche Einstellungen vornehmen und individuell als Profil abspeichern.




ULTRASCHALLENSOR

Nachdem der Sensor die Ausgießform erkannt hat, startet die Paraffindosierung automatisch.



BOOST - FUNKTION

Bereits 30 Minuten nach dem Einschalten betriebsbereit.

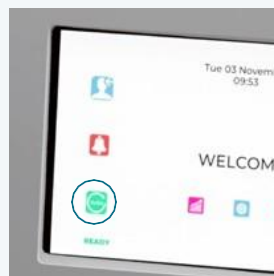

FÜLLSTANDSÜBERWACHUNG

Überwacht den Füllstand im Paraffinbehälter und gibt bei Bedarf eine Meldung am Display aus.



1

MODULARES SYSTEM

Dante besteht aus einem Einbettmodul und einer Kühlplatte, individuell positionierbar

2

6L PARAFFINBEHÄLTER

Die Schmelztemperatur kann stufenlos von +50 bis +75 °C eingestellt werden.

3

GROSSE BEHEIZTE FLÄCHE

Ausgestattet mit Rillen, welche das Abfließen von Paraffin erleichtern.

4

LED - BELEUCHTUNG

Die Arbeitsfläche wird durch eine LED - Lampe im Dosierkopf optimal ausgeleuchtet.

5

INTUITIVES, LEICHT BEDIENBARES DISPLAY

mit "Smart Screen System", welches den Bediener durch visuelle Signale laufend über den Systemstatus informiert.

6

GROSSE KÜHLPLATTE

Für bis zu 126 Standardkassetten oder 33 Super-Mega-Kassetten.

7

ULTRASCHALLSENSOR

Erkennt die Ausgießform und beginnt automatisch mit der Paraffindosierung.

8

SPEZIELLE VERTIEFUNGEN

Fangen überschüssiges Wasser nach dem Abtauen auf.

9

Abnehmbarer Pinzettenhalter zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen.



OPTIONALES ZUBEHÖR



8



Lupe mit LED -
Lampe



Beheizte Pinzetten
DIAforceps
Advanced (1 mm
und 2 mm)



Fußtaste



Schaber



El. Pinzettensystem
DIAforceps
Advanced

1 DANTE, DIE MODULARE LÖSUNG



Dante heißt: Neue Funktionen, für Sie entwickelt



Anzeige "Eco - Index"

Die tatsächliche Arbeitszeit wird zur programmierten Einschaltzeit in Relation gesetzt.



Statistische Auswertung der durchgeführten Ausgießvorgänge.



PATENTIERTE MATERIALIEN

Die patentierten Materialien garantieren maximalen Schutz vor Korrosion und vorzeitiger Alterung.



LEICHT ZU REINIGEN

Dante ermöglicht die Reinigung der Arbeitsflächen auch bei niedrigen Temperaturen.





Dante steht für ergonomisches Design zu Ihrem Schutz

AUTOMATISCHE PARAFFINDOSIERUNG: KOMFORT FÜR DEN ANWENDER

Das Paraffin kann auf 3 Arten dosiert werden: Manuell, über das Pedal oder mit Hilfe des US - Sensors. Sich ständig wiederholende, schädliche Bewegungsabläufe werden dadurch verhindert.

MODULARE LÖSUNG, VOLLE FLEXIBILITÄT

Je nach Vorliebe des Benutzers und dem gewohnten Arbeitsablauf können die beiden Module individuell aufgestellt werden.

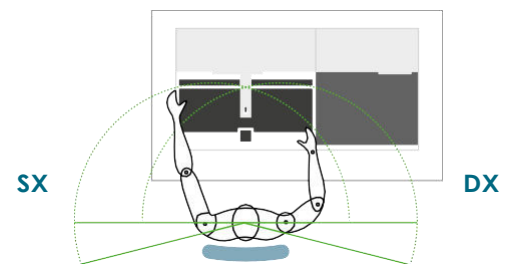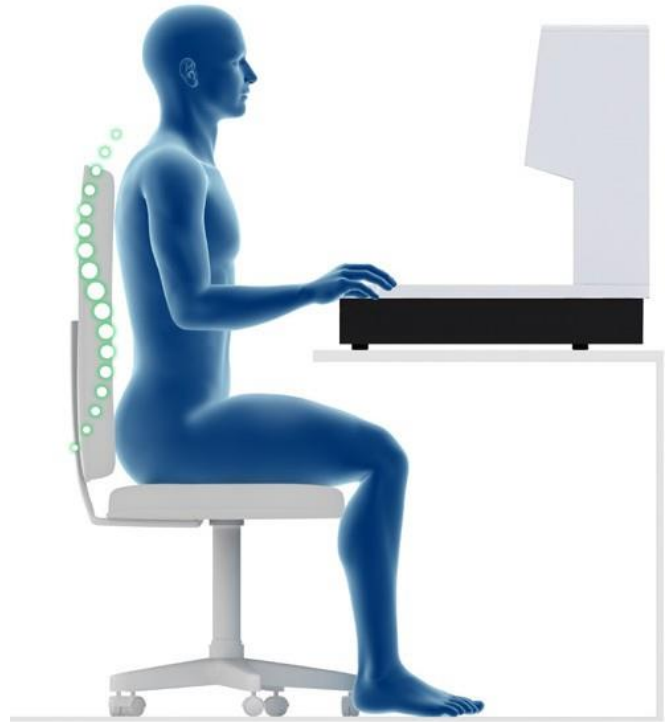

Dante steht für intuitive, fortschrittliche Software

4.3" TOUCH


Das Display kann auch mit Handschuhen aus Vinyl, Nitril oder Latex bedient werden.

PERSÖNLICHE ANPASSUNG

Dante bietet benutzerfreundliche Icons und personalisierbare Profile.

INNOVATIVE FÜLLSTANDSÜBERWACHUNG

Das System benachrichtigt den Benutzer, wenn der Paraffinbehälter nachgefüllt werden muss. Dies ermöglicht kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.

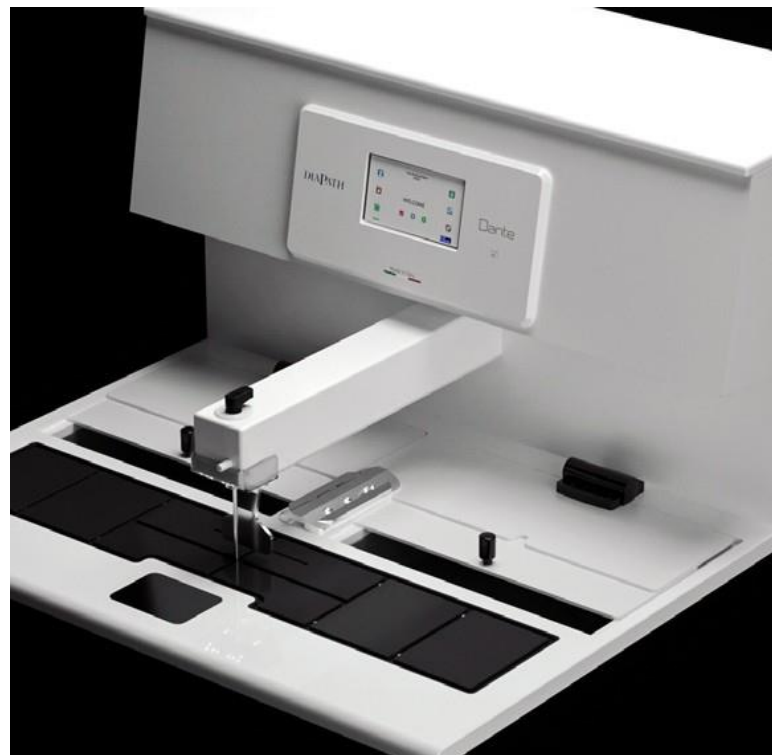



Große Kühlplatte

LEISTUNGSSTARKES KÜHLSYSTEM

Innerhalb von 10 min. wird eine Temperatur von -20 °C erreicht. Somit können bis zu 65 Proben nach 30 min. weiterverarbeitet werden.

Die Temperatur wird digital am Display angezeigt.

HOHE KAPAZITÄT AUF KLEINSTEM RAUM

Spezielle Vertiefungen fangen das überschüssige Wasser nach dem Abtauen auf. Somit bleibt Ihr Arbeitsplatz sauber und trocken.



Technische Daten

	AUSGIESSMODUL	KÜHLPLATTE
CODE	SDSDC9000	SDSDF9000 (model 230V) SDSDF9100 (model 110V)
GRÖSSE (B x H x T)	600 x 590 x 410 mm	400 x 590 x 410 mm
INHALT PARAFFINBEHÄLTER	6 Liter	–
BELEUCHTUNG	LED – Lampe, verstellbar	–
AUFHEIZZEIT	Betriebsbereit in 30 Minuten	–
KÜHLZEIT	–	-20 °C in 10 min.
BEDIENOBERFLÄCHE	4,3" Touch Display	Touch Display
BETRIEBSTEMPERATUR	von +50 °C bis +75 °C	von -20 °C bis Raumtemperatur
GEWICHT	30 kg	23 kg (Modell 230 V)
ERFÜLLT DIE NORM	CE-IVD-UL	CE-IVD-UL

Erfahren Sie mehr bei einer
virtuellen Präsentation mit
unseren Produktspezialisten

SCAN HERE



Unser Komplettangebot für die Pathologie



Donatello SERIE 2

Entwässerungs-
automat



Galileo SERIE 2

Rotations-
mikrotom



Giotto

Färbe-
automat



Cristallo®

Patentierte Eindeck-
lösung für Objektträger

Besuchen Sie unsere Homepage: www.diapath.com

Auszeichnungen

DIAPATH



Co-funded by the "Horizon
2020" programme of the
European Union



Donatello Series 2 wins
a Design Award and
Competition 2019 in
Scientific Instruments



34th Design Award
2021 World Ranking in
the category "Medical
Appliances"



Approved CEU's Provider
by NSH - National Society
for Histology

Sanova Pharma GesmbH

Haidestraße 4, 1110 Wien
Spitzermühlestraße 6, 4713 Gallspach
Tel.: 01 801 04 25 60

Techn. Service: 01 801 04 25 87
Email: medicalsistemas@sanova.at
Web: medicalsistemas.sanova.at



Sanova
Advancing health

Diapath S.p.A.

Via Pietro Savoldini, 71 — 24057 Martinengo (BG)
T +39 0363 986411 — info@diapath.com — diapath.com

